


HAIDIG®

Kindergartenbedarf – Therapiebedarf – Befestigungslösungen

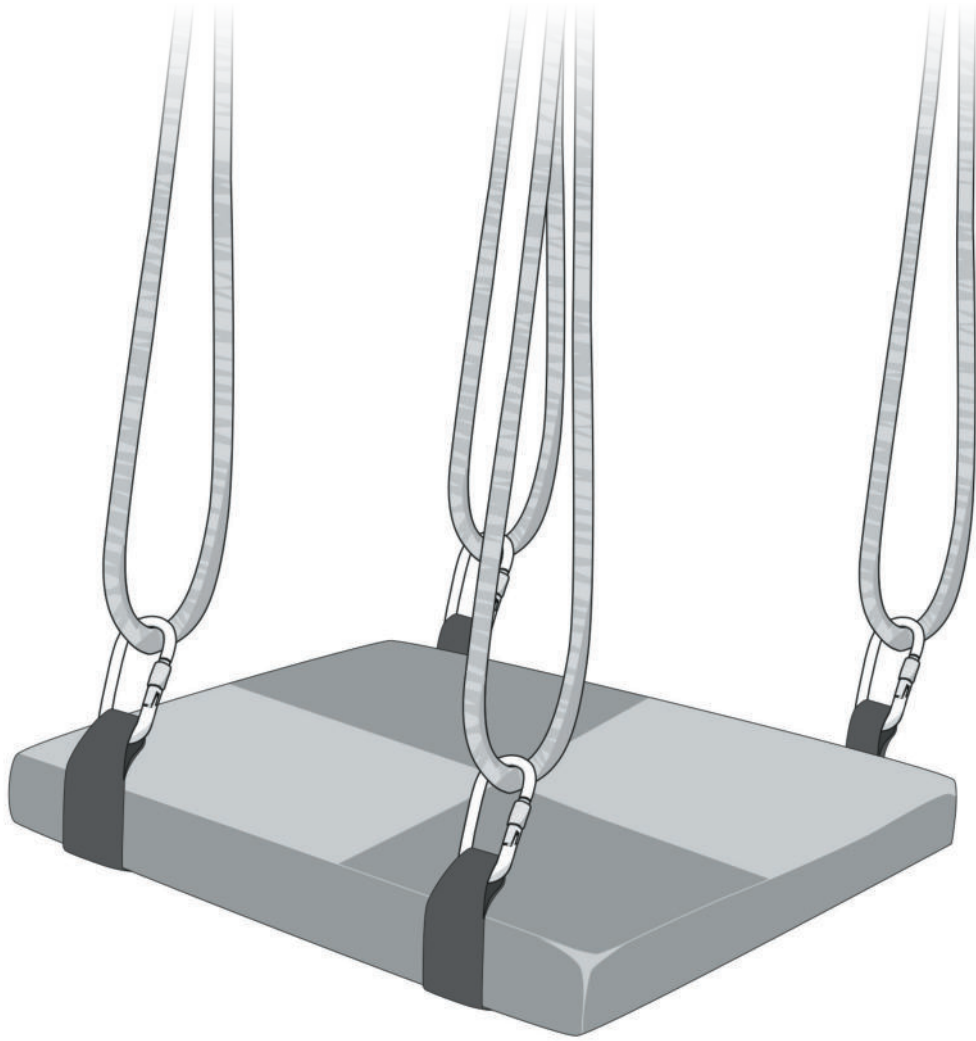

Therapieschaukel

Maximallast: 150 kg

Damit's sicher ist!

HAIDIG GmbH & Co. KG

🏠 Gernotstr. 17 - 44319 Dortmund


☎ +49 (0)231 91 28 156

📠 +49 (0)231 91 28 157

@ info@haidig.de

🌐 www.haidig.de

🛒 www.kindergartenbedarf-haidig.de

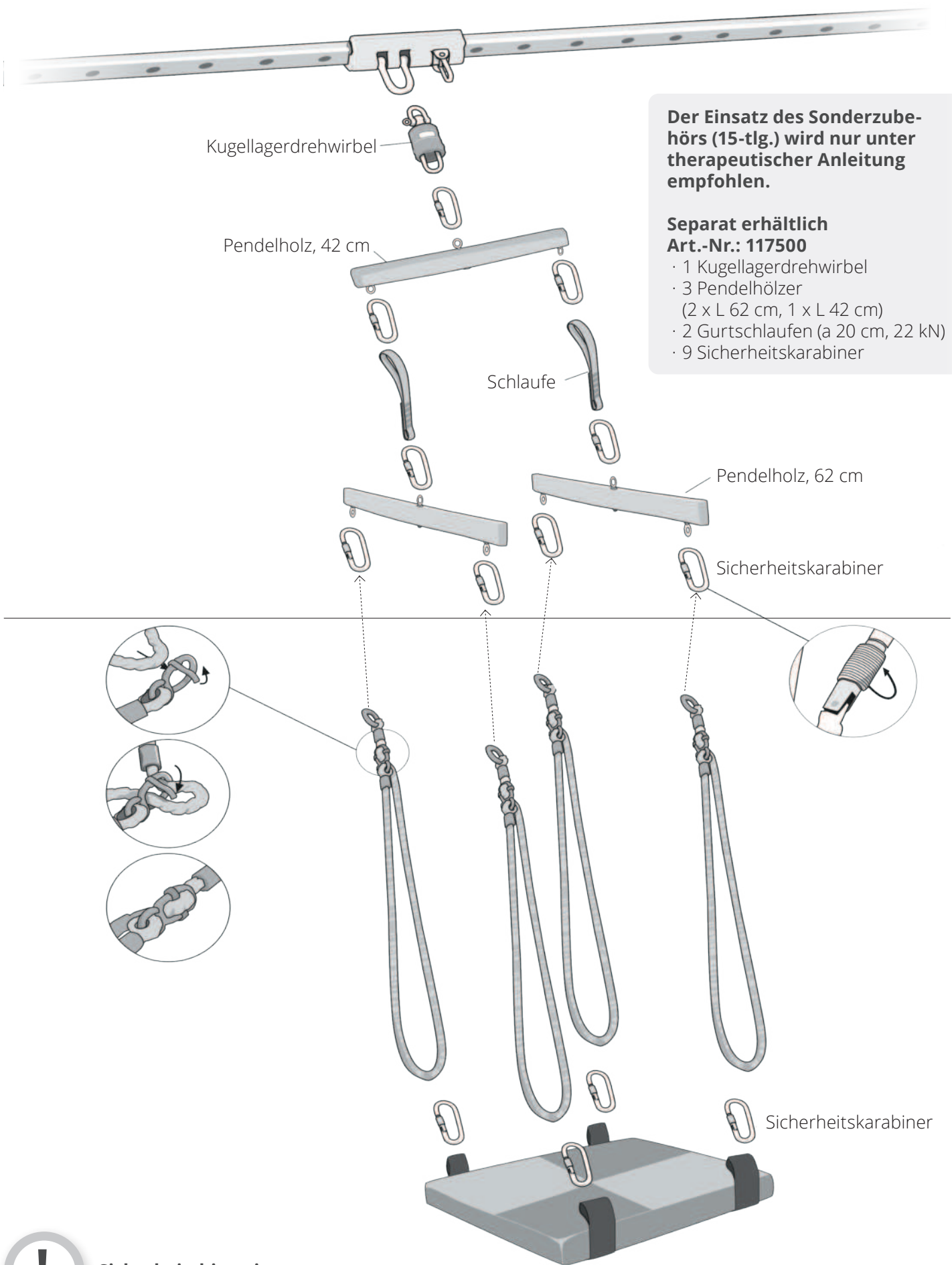

Kugellagerdrehwirbel

Pendelholz, 42 cm

Schleife

Pendelholz, 62 cm

Sicherheitskarabiner

Sicherheitskarabiner

Der Einsatz des Sonderzubehörs (15-tlg.) wird nur unter therapeutischer Anleitung empfohlen.

**Separat erhältlich
Art.-Nr.: 117500**

- 1 Kugellagerdrehwirbel
- 3 Pendelhölzer
(2 x L 62 cm, 1 x L 42 cm)
- 2 Gurtschlaufen (a 20 cm, 22 kN)
- 9 Sicherheitskarabiner



Sicherheitshinweis:

Achten Sie bitte auf eine fachgerechte Montage und verwenden hierfür nur Originalteile des Herstellers!
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit.

HerstellereinFORMATION

Therapieschaukel (SI-Schaukel)

Hersteller:
HAIDIG® OHG
Amtsgericht Dortmund
HRA 16342

Artikelnummer: 117000

Sicherheitshinweise:

Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar.

Bitte angemessene Kleidung, wie Sportkleidung, Turnschuhe o. Ä. tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Armreifen, Ohrringe, Piercings o. Ä.) ablegen.

Maximallast	150 kg
Größe	ca. 80 x 80 cm
Eigengewicht	ca. 11 kg ohne Zubehör
Material	Cordura, Polypropylengurtband, Multiplexplatte mit Schaumstoff gepolstert
Zubehör	inkl. 4 höhenverstellbare Aufhängeseile (je 2,5 m) und 4 Sicherheitskarabiner

Einsatzmöglichkeiten:

In Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

Anwendungsmöglichkeiten:

Die Therapieschaukel kann an einem Deckenaufhängungssystem an **vier, zwei** oder **einem** Punkt aufgehängt werden (empfohlen wird unser HAIDIG® T-Schienen-System).

Beurteilungskriterien:



- einsetzbar in der Ergotherapie und Motopädie/Psychomotorik
- für die Behandlung von Kindern und Erwachsenen,
- unverzichtbar für z.B. Gleichgewichtsübungen, Tonus-Regulation,
- Aktivierung der Aufrichtreaktionen,
- Stimulation der extraokularen Muskulatur usw.

Pflege und Reinigung:

Cordura ist ein robustes und unempfindliches Material. Trockener Schmutz lässt sich leicht herausbürsten. Bei stärkeren Verschmutzungen kann mit Wasser und einer Seifenlösung vorgereinigt werden. Bitte vermeiden sie eine extreme, mechanische Reinigung, diese kann zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen. Desinfektion bitte ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol / Propanol). Die Verwendung anderer Substanzklassen können zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials führen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel! Matten sind nur in Turnschuhen oder Socken zu betreten.

Anwendungsbeispiele

1. HAIDIG® Decken-T-Schienensystem mit 1-Punkt-Aufhängung

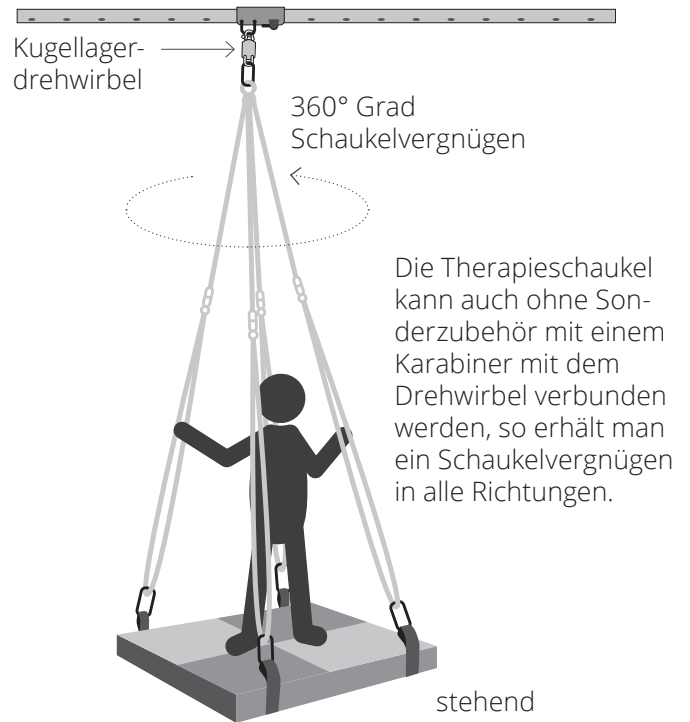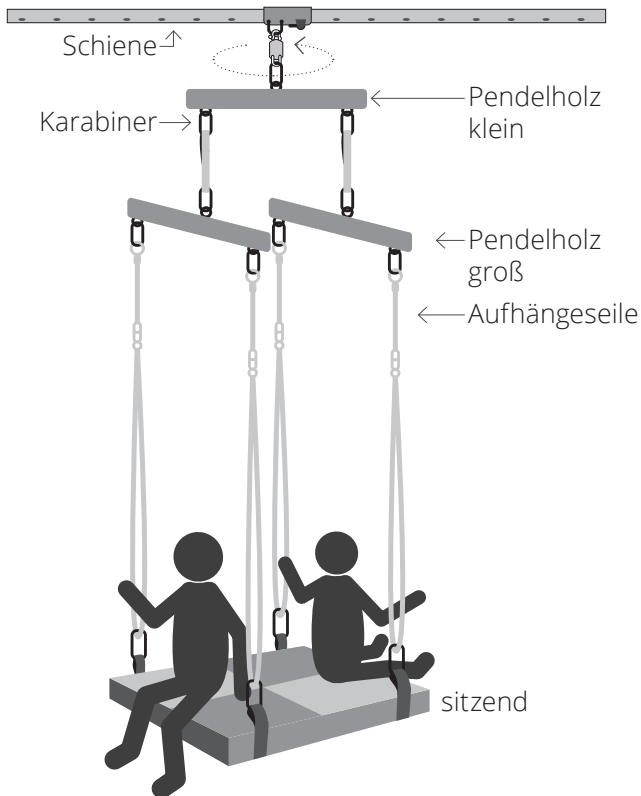

Unter Berücksichtigung der Maximallast, können auch mehrere Kinder die Schaukel gleichzeitig nutzen.



2. HAIDIG® Decken-T-Schienensystem mit 4-Punkt-Aufhängung

In der Bauchlage nach Bällen oder Sandsäcken greifen und im Anschluss werfen um etwas zu treffen (Kegel, Tor). Trainiert sehr gut die Rückenmuskulatur.

Die Kinder müssen in der Schaukelbewegung vorwärts mit den Händen abwechselnd das Seil greifen um nach vorne zu schaukeln. In der Schaukelbewegung rückwärts muss das Seil locker gelassen werden und kann dabei durch die Hände gleiten. Die Kinder erleben hier einen schnellen Wechsel von Zug und Druck über die Hände.

