

# HAIDIG®

Kindergartenbedarf – Therapiebedarf – Befestigungslösungen



## Schwebeschaukel

Maximallast 150 kg

*Damit's sicher ist!*

### HAIDIG GmbH & Co. KG

🏠 Gernotstr. 17 - 44319 Dortmund

☎ +49 (0)231 91 28 156

📠 +49 (0)231 91 28 157

@ info@haidig.de

🌐 www.haidig.de

🛒 www.kindergartenbedarf-haidig.de

### Sonderzubehör Set 1 (8-tlg.)

separat erhältlich

Art.-Nr.: 1150401

- 1 x Kugellagerdrehwirbel
- 1 Federpaket blau, weich, bis 80 kg
- 2 Mehrfachaufhängeschlaufen, 140 cm
- 4 Sicherheitskarabiner

### Sonderzubehör Set 2 (8-tlg.)

separat erhältlich

Art.-Nr.: 1150402

- 1 x Kugellagerdrehwirbel
- 1 Federpaket rot, hart, bis 100 kg
- 2 Mehrfachaufhängeschlaufen, 140 cm
- 4 Sicherheitskarabiner

### Sonderzubehör Set 3 (6-tlg.)

separat erhältlich

Art.-Nr.: 1150403

- 2 Federpaket blau, weich, bis 80 kg
- 2 Mehrfachaufhängeschlaufen, 140 cm
- 2 Sicherheitskarabiner



Kugellagerdrehwirbel, offen




Federpaket



#### Sicherheitshinweis:

Achten Sie bitte auf eine fachgerechte Montage und verwenden hierfür nur Originalteile des Herstellers! Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit.

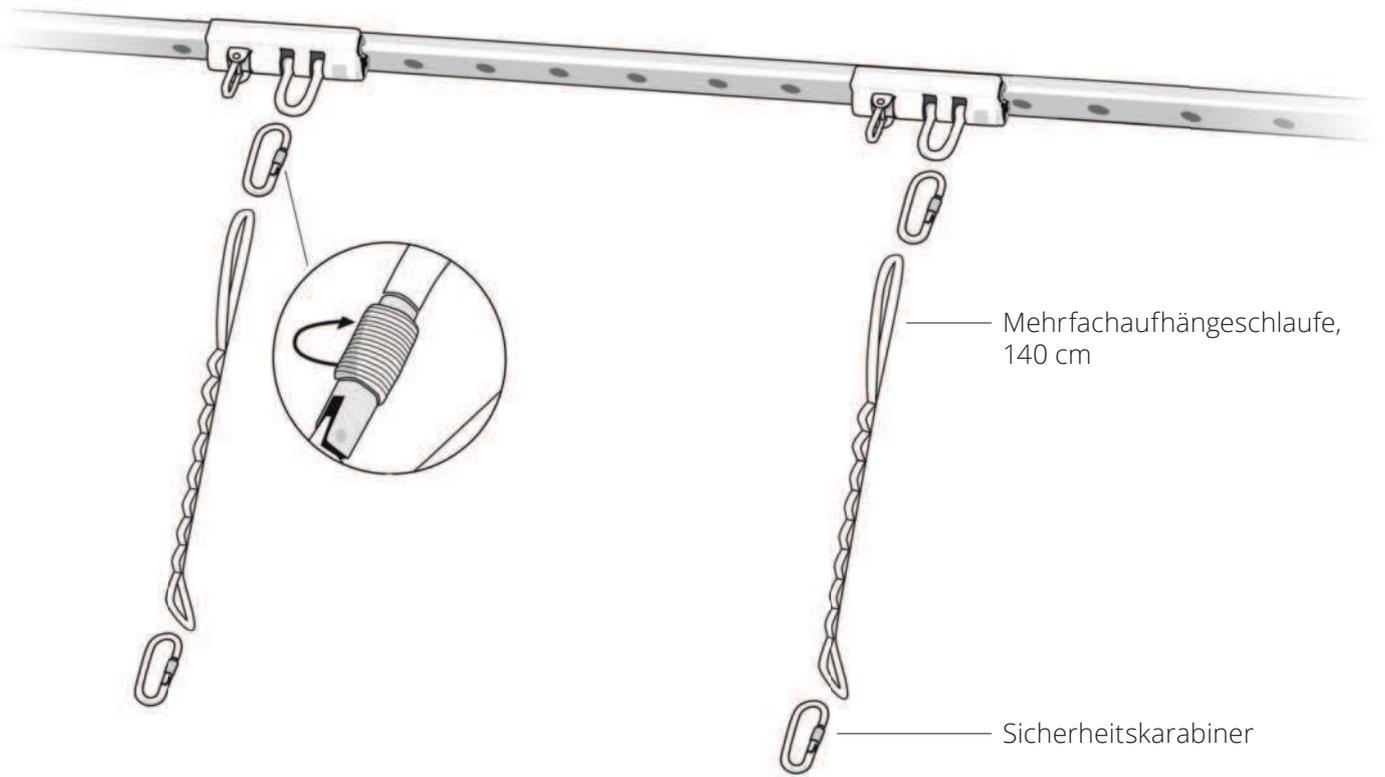

Mehrfachaufhängeschlaufe,  
140 cm

Sicherheitskarabiner



**Sonderzubehör Set 1 (8-tlg.)  
separat erhältlich**

**Art.-Nr.: 1150401**

- 1 x Kugellagerdrehwirbel
- 1 Federpaket blau, weich, bis 80 kg
- 2 Mehrfachaufhängeschlaufen,  
140 cm
- 4 Sicherheitskarabiner

**Sonderzubehör Set 2 (8-tlg.)  
separat erhältlich**

**Art.-Nr.: 1150402**

- 1 x Kugellagerdrehwirbel
- 1 Federpaket rot, hart, bis 100 kg
- 2 Mehrfachaufhängeschlaufen,  
140 cm
- 4 Sicherheitskarabiner

**Sonderzubehör Set 3 (6-tlg.)  
separat erhältlich**

**Art.-Nr.: 1150403**

- 2 Federpaket blau, weich, bis 80 kg
- 2 Mehrfachaufhängeschlaufen,  
140 cm
- 2 Sicherheitskarabiner



**Sicherheitshinweis:**

Achten Sie bitte auf eine fachgerechte Montage und verwenden hierfür nur Originalteile des Herstellers! Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit.

# HerstellereinFORMATION

## Schwebeschaukel

**Hersteller:**  
HAIDIG® OHG  
Amtsgericht Dortmund  
HRA 16342

**Artikelnummer:** 115040

### Sicherheitshinweise:

**Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar.**

Bitte angemessene Kleidung, wie Sportkleidung, Turnschuhe o. Ä. tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Armreifen, Ohrringe, Piercings o. Ä.) ablegen.

<b>Maximallast</b>	Federpaket blau: 80 kg, Federpaket rot: 100 kg, ohne Federpakete und nur mit Mehrfachaufhängeschlaufen: 150 kg
<b>Größe</b>	ca. 300 x 27 cm
<b>Eigengewicht</b>	ca. 1 kg
<b>Material</b>	Cordura, Polypropylengurtband
<b>Zubehör</b>	–

### Einsatzmöglichkeiten:

In Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

### Anwendungsmöglichkeiten:

Die Schwebeschaukel kann an einem Deckenaufhängungssystem an **zwei** oder **einem** Punkt aufgehängt werden (empfohlen wird unser HAIDIG® T-Schienensystem).

### Beurteilungskriterien:


- Fördert höhere Konzentration auf Gleichgewichtsstimulierung und Tiefensensibilität (aufgrund der geringen Auflagefläche.)
- Fördert Gleichgewichtssinn (vor allem im Einsatz mit den Zubehörsets)
- Fördert die Körperkoordination

### Pflege und Reinigung:

Cordura ist ein robustes und unempfindliches Material. Trockener Schmutz lässt sich leicht herausbürsten. Bei stärkeren Verschmutzungen kann mit Wasser und einer Seifenlösung vorgereinigt werden. Bitte vermeiden sie eine extreme, mechanische Reinigung, diese kann zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen. Desinfektion bitte ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol / Propanol). Die Verwendung anderer Substanzklassen können zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials führen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel!

# Anwendungsbeispiele

## 1. HAIDIG® Decken-T-Schienensystem mit 1-Pkt.-Deckenaufhängung

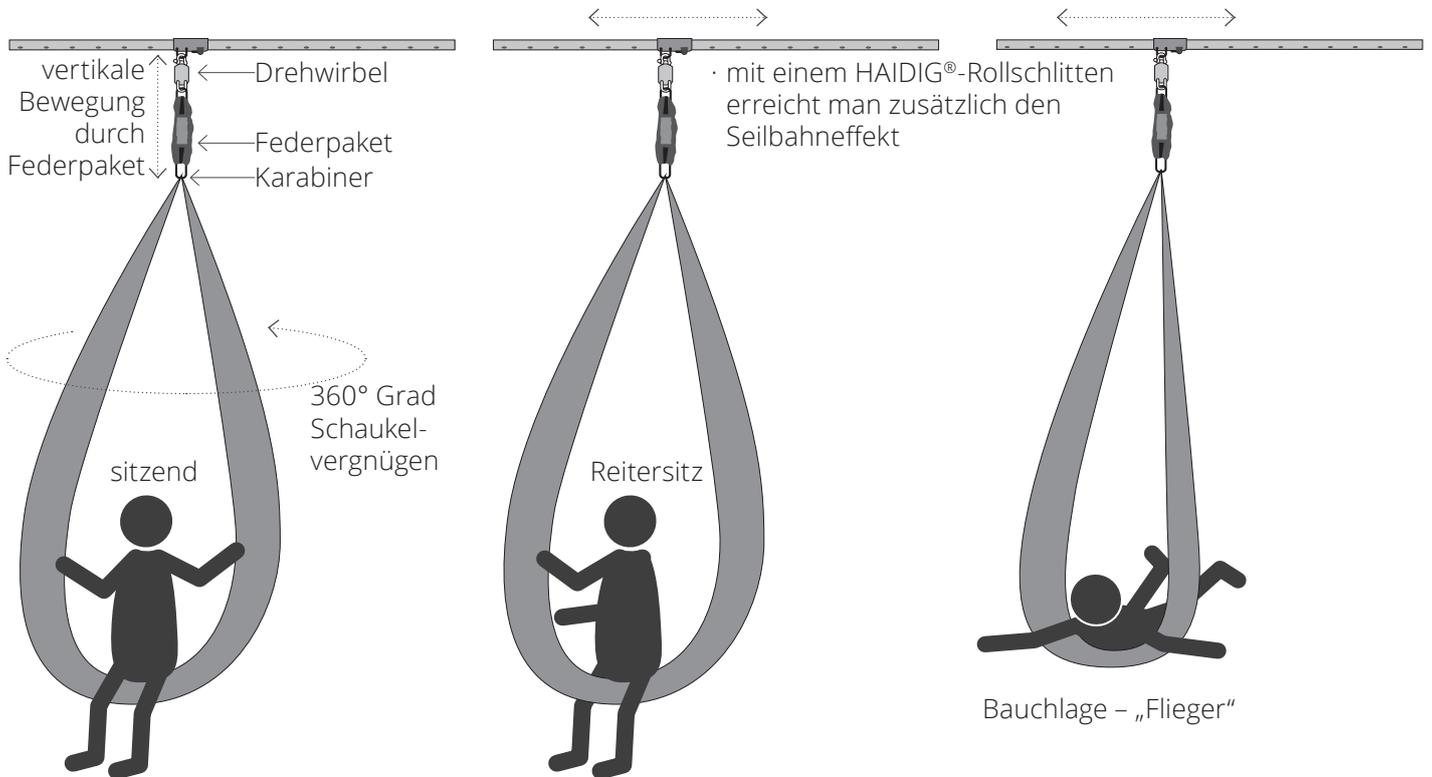

## 2. HAIDIG® Decken-T-Schienensystem mit 2-Pkt.-Deckenaufhängung

