


# HAIDIG®

Kindergartenbedarf – Therapiebedarf – Befestigungslösungen

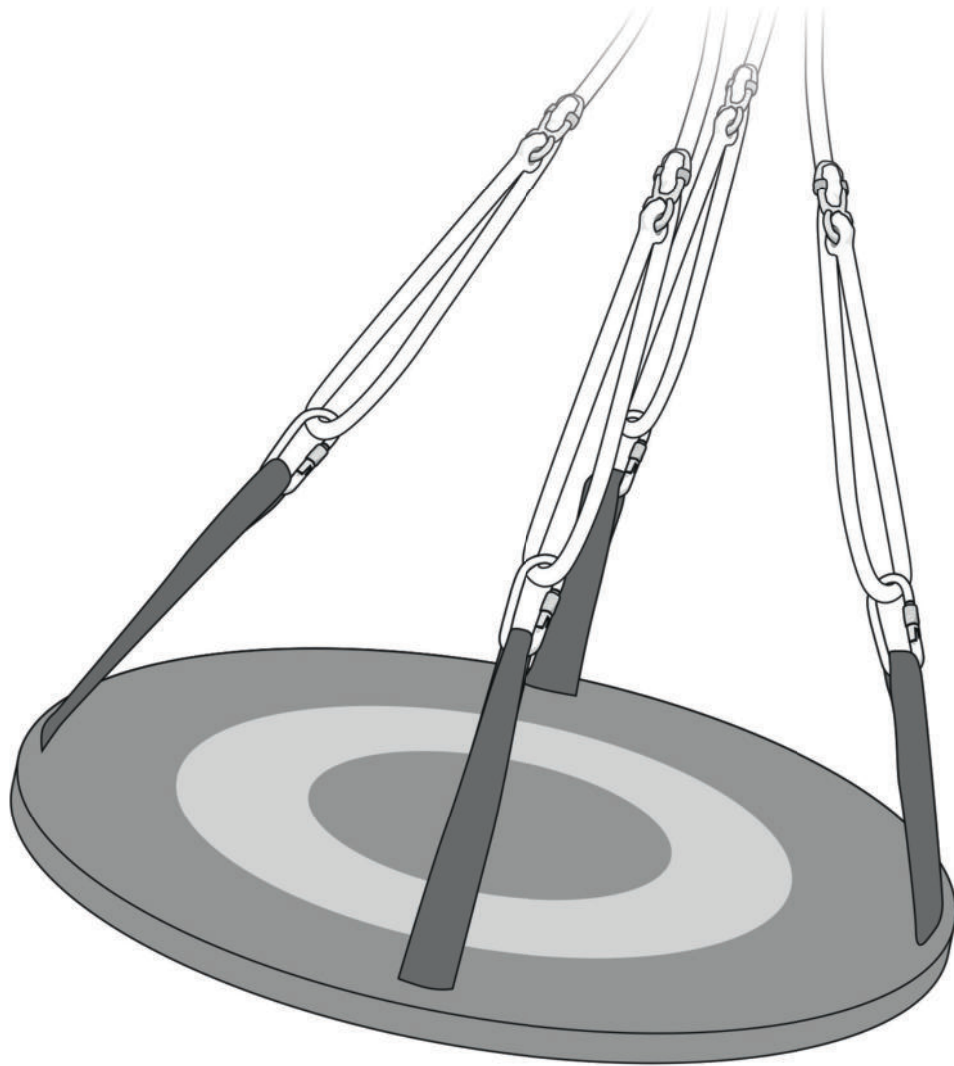

## Kreisschaukel

Maximallast 150 kg

*Damit's sicher ist!*

**HAIDIG GmbH & Co. KG**

🏠 Gernotstr. 17 - 44319 Dortmund

☎ +49 (0)231 91 28 156


📠 +49 (0)231 91 28 157


@ info@haidig.de


🌐 www.haidig.de

🛒 www.kindergartenbedarf-haidig.de





Kugellagerdrehwirbel, offen — 

Sicherheitskarabiner — 

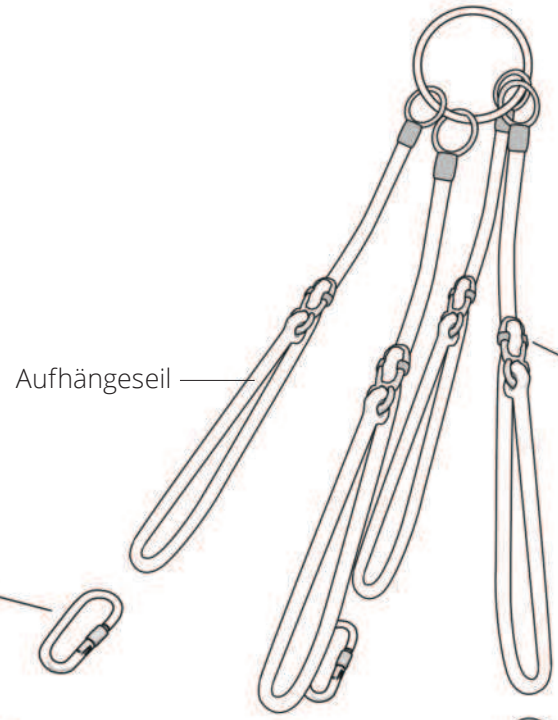

Aufhängeseil —

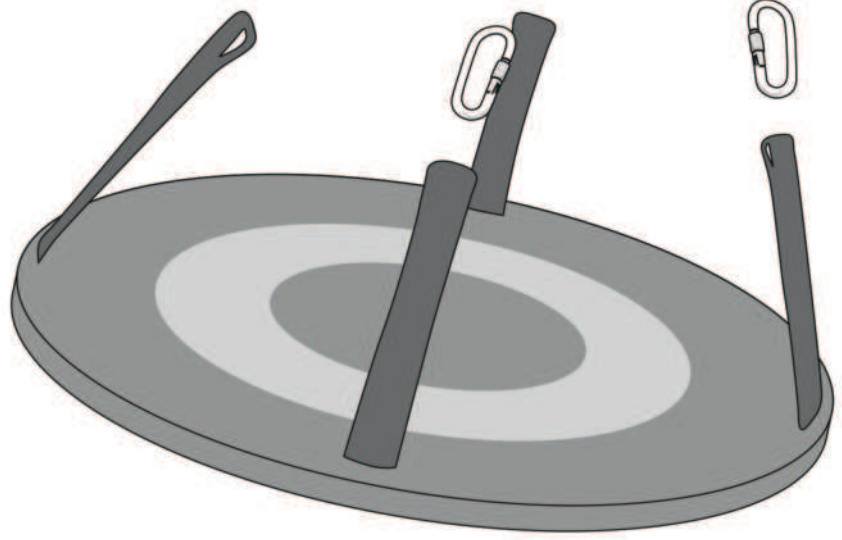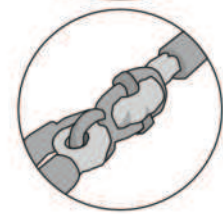

**Sicherheitshinweis:**  
Achten Sie bitte auf eine fachgerechte Montage und verwenden hierfür nur Originalteile des Herstellers!  
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit.

# Herstellereinformation

## Kreisschaukel

**Hersteller:**  
HAIDIG® OHG  
Amtsgericht Dortmund  
HRA 16342

**Artikelnummer:** 117020

### Sicherheitshinweise:

**Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar.**

Bitte angemessene Kleidung, wie Sportkleidung, Turnschuhe o. Ä. tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Armreifen, Ohrringe, Piercings o. Ä.) ablegen.

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Maximallast</b>  | 150 kg   |
| <b>Größe</b>        | ø ca. 90 cm  |
| <b>Eigengewicht</b> | ca. 10 kg  |
| <b>Material</b>     | Cordura, Polypropylengurtband<br>Multiplexplatte mit Schaumstoff gepolstert                                    |
| <b>Zubehör</b>      | inkl. 4 Aufhängeseile (je 2,5 m), höhenverstellbar und<br>5 Sicherheitskarabiner, 1 Kugellagerdrehwirbel offen |

### Einsatzmöglichkeiten:

In Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

### Anwendungsmöglichkeiten:

Die Kreisschaukel kann an einem Deckenaufhängungssystem an **einem** Punkt aufgehängt werden (empfohlen wird unser HAIDIG® T-Schienensystem).

### Beurteilungskriterien:


- Unverzichtbar für z.B. Gleichgewichtsübungen, Tonusregulation, Arbeit mit Schwerkraft
- Aktivierung der Aufrichtereaktion
- Stimulation der extraokularen Muskulatur u.v.m.
- Förderung der Körperkoordination
- Einsetzbar in Ergotherapie und Psychomotorik
- Für die Behandlung von Kindern und Erwachsenen

### Pflege und Reinigung:

Cordura ist ein robustes und unempfindliches Material. Trockener Schmutz lässt sich leicht herausbürsten. Bei stärkeren Verschmutzungen kann mit Wasser und einer Seifenlösung vorgereinigt werden. Bitte vermeiden sie eine extreme, mechanische Reinigung, diese kann zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen. Desinfektion bitte ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol / Propanol). Die Verwendung anderer Substanzklassen können zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials führen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel!

# Anwendungsbeispiele

## HAIDIG® Decken-T-Schienensystem mit 1-Punkt-Aufhängung

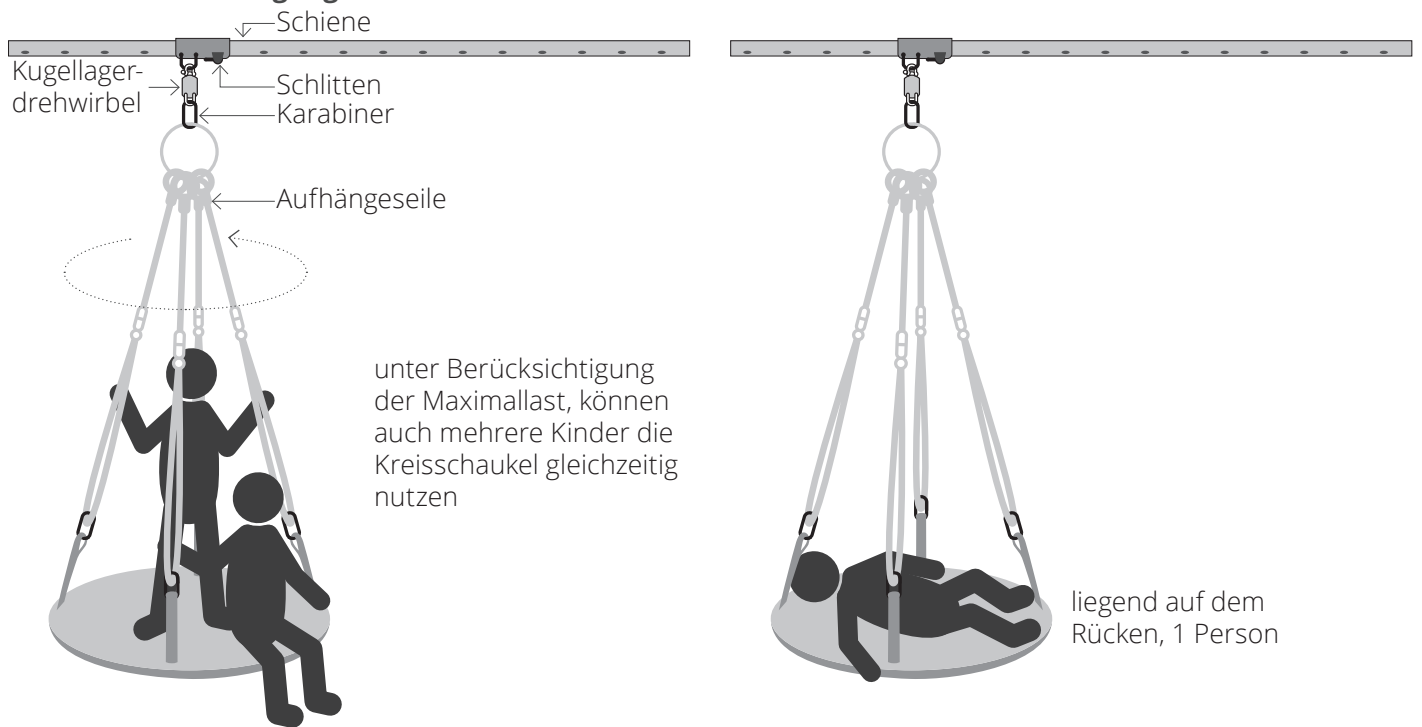

## Spielideen



liegend auf dem Bauch nach Bällen greifen und im Anschluss werfen um etwas zu treffen (Kegel, Tor)



Die Kinder müssen in der Schaukelbewegung vorwärts mit den Händen abwechselnd das Seil greifen um nach vorne zu schaukeln. In der Schaukelbewegung rückwärts muss das Seil locker gelassen werden und kann dabei durch die Hände gleiten. Die Kinder erleben hier einen schnellen Wechsel von Zug und Druck über die Hände.